

# Prevence a léčba dekubitů

Komplexní řada produktů B. Braun



# Linovera®

## Roztok hyperoxidovaných mastných kyselin

- Prevence a léčba dekubitů I. stupně
- Chrání kůži proti vnějším vlivům
- Zlepšuje odolnost kůže
- Reparuje svrchní epidermis
- Obnovuje kapilární oběh
- Stimuluje syntézu kolagenu
- Má hydratační a hojivý účinek



### TIPY PRO POUŽITÍ

Přípravek Linovera® aplikujte 2–3krát denně na postižené místo a šetrně jej vmasírujte do kůže, aby se rovnoměrně vstřebal.

V kombinaci s obvazem Askina® DresSil Heel Border jej použijte k optimální ochraně pat proti dekubitům.

# Askina® Barrier Cream

## Ochranný krém proti maceraci

- Proti maceraci způsobené při inkontinenci a úniku jiných tělních tekutin
- Ochrana citlivé, křehké a suché kůže, včetně okolí rány
- Aplikace malého množství postačí na poměrně velkou plochu
- Po aplikaci vytváří parapropustnou ochrannou vrstvu
- Nesnižuje savost inkontinentních pomůcek
- Je voděodolný



### TIPY PRO POUŽITÍ

Před aplikací pokožku důkladně osušte.

Naneste Askina® Barrier Cream v tenké vrstvě na postiženou oblast.

Lze užívat opakovaně.

Produkt Askina® Barrier Cream je také vhodný pro péči o okolí rány.

# Askina® DresSil Sacrum Border Askina® DresSil Heel Border

## Pěnové obvazy se silikonovou adhezivní vrstvou

- Díky silikonové vrstvě je traumatizace rány při převazech omezena na minimum
- Šetrná a spolehlivá přilnavost
- Obvaz Askina® DresSil Heel Border lze použít i na loket
- Je hypoalergenní a má významnou absorpční kapacitu




### TIPY PRO POUŽITÍ





Obvaz Askina® DresSil se může používat jak k léčbě, tak i k prevenci poškození kůže.

S obvazy Askina® DresSil Sacrum Border a Askina® DresSil Heel Border se pacient může sprchovat.

# Použití řady produktů B. Braun

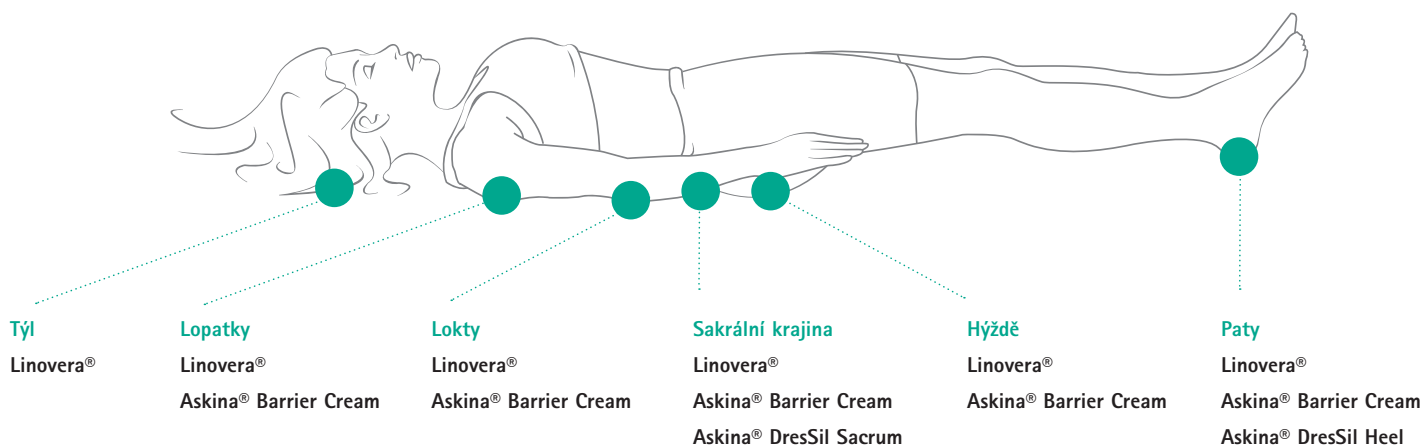

## Stupně závažnosti dekubitů

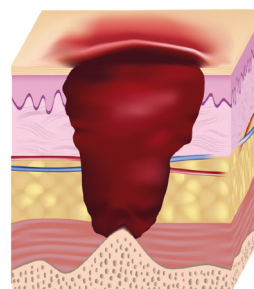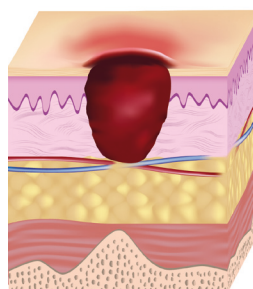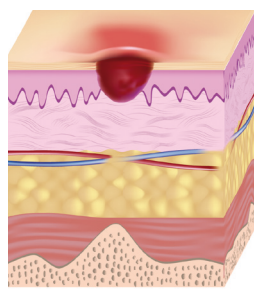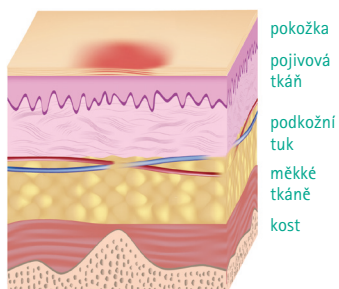

### I. stupeň – erytém

**Tlakové léze bez poškození kůže**

Na neporušené kůži se objevuje zčervenání, oblast je oteklá, teplá a nebolestivá. Přesto však nemocný pociťuje pálení, svědění pokožky.

### II. stupeň – puchýř

**Tlakové léze s částečným poškozením kůže**

Dochází k poškození pokožky a kůže, vytváří se puchýře. Tato fáze je velmi bolestivá.

### III. stupeň – nekróza

**Tlaková léze se zničením tkání mezi kostí a pokožkou**

Poškození zasahuje podkožní vrstvy, v nichž může docházet k odumírání tkáně. Tvoří se hluboký vřed, který je často kryt suchou černohnědou krustou (strup) z odumřelých buněk, nebo vlhkým žlutohnědým povlakem. Objevuje se teplota a nechutenství jako jedny z mnoha odpovědí lidského těla na probíhající zánět.

### IV. stupeň – vřed

**Tlakové léze provázené ostitidami a artritidami**

Dochází k rozsáhlé destrukci, odumírá svalová tkáň, poškozena je i kost. I tato rána může být pokryta černohnědou krustou z buněk odumřelé tkáně.

## Informace pro objednání

Produkt	Velikost	Kusů v balení	Katalogové číslo	Kód VZP
Kufřík Prevence a léčba dekubitů*	-	1	DECUB-125	-

\* Obsah balení: Linovera®, Askina® Barrier Cream, Askina® DresSil Heel Border, Askina® DresSil Sacrum Border

Produkty jednotlivě	Velikost	Kusů v balení	Katalogové číslo	Kód VZP
Linovera® Spray	30 ml	1	468156	0082011 bal
Askina® Barrier Cream	92 g	1	4119201	-
Askina® DresSil Sacrum Border	16 x 17,5 cm (13 x 14,5 cm)	5	5491605	-
Askina® DresSil Heel Border	22 x 21,6 cm (18,9 x 18,5 cm)	5	5592205	-



[www.lepsipece.cz](http://www.lepsipece.cz)



**ZELENÁ HVĚZDA**

Váš dodavatel zdravotnických prostředků

[www.zelenahvezda.cz](http://www.zelenahvezda.cz)