

Novinka

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Ally®

Partner stomika na každý deň

Stomické príslušenstvo



Ally® Stomické príslušenstvo

Každá postava je iná. Rovnako ako každá stómia. Rad príslušenstva Ally® je navrhnutý tak, aby umožnil ešte individuálnejšiu starostlivosť o stómiu.


Ruka v ruku so stomickým vreckom môžu výrobky Ally® pomôcť bezpečne držať stomické vrecko na svojom mieste, obmedziť problémy s podtekaním a prispieť k lepšiemu fungovaniu stómie, chrániť a starať sa o okolitú pokožku.

Ally® - váš partner na každý deň






- 4 Ally® Stomické tesniace krúžky
Tesniaci vyrovnávací ochranný krúžok

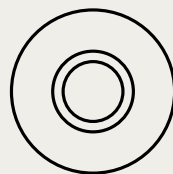

- 6 Ally® Vyrovnávacie pásy
Elastické pásy pre stomikov

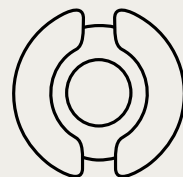

- 8 Ally® Stomická pasta
Ochranná bariérová pasta
bez alkoholu



- 10 Ally® Stomický púder
Púder pre stomikov





Ally® Stomické tesniace krúžky

Tesniaci vyrovnávací krúžok

Ally® Stomické tesniace krúžky sú navrhnuté tak, aby chránili pred podtekaním a zároveň chránili pokožku. Krúžok vytvára rovnejší povrch okolo stómie, pomáha vypĺňať priehlbiny a kožné záhyby. Tesniaci krúžok je tiež možno jednoducho tvarovať, aplikovať a odstraňovať.

Ally® Stomické tesniace krúžky sa odporúčajú najmä pre osoby, ktoré majú v okolí stómie kožnú riasu alebo záhyby. Krúžky sú tiež prispôsobené pre osoby s horšou jemnou motorikou alebo horšou pohyblivosťou rúk.



	Názov výrobku	Hrúbka (mm)	Priemer (mm)	Množstvo (ks)	Katalóg. číslo	ŠUKL kód
	Ally® Stomické tesniace krúžky	3	98	10	2022983	F5483A
	F6.1 Vkladací krúžok - Tesniace krúžky - 10ks/mesiac					
	Ally® Stomické tesniace krúžky	4,5	48	10	2022484	F5483A
		3		10	2022483	F5483A
	F6.1 Vkladací krúžok - Tesniace krúžky - 10 ks/mesiac					



Ako používať



Zabezpečte, aby bola pokožka v okolí stómie čistá a suchá.



Odstráňte ochrannú fóliu.

Prispôsobené pre ľudí so zníženou pohyblivosťou.
Ľahko odstrániteľná ochranná fólia vďaka uškám.



Krúžok vytvarujte prstami a roziahnite do požadovaného tvaru.



Nalepte krúžok okolo stómie. Pokiaľ ešte potrebujete upraviť tvar krúžku, jemne ho vyhladzte mokrými prstami. Krúžok potom lepšie prilne k pokožke.



Nalepte stomické vrecko na krúžok, stred vrecka musí byť zarovnaný so stredom krúžku a musí dobre priliehať .

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie.


Ally® Vyrovnávacie pásky

Elastické pásky pre stomikov

Ally® Vyrovnávacie pásky pomáhajú posilniť príľnavosť a udržať stomickú pomôcku bezpečne na mieste počas celej doby nosenia. Sú navrhnuté tak, aby kopírovali línie tela aj pri pohybe.

Ally® Vyrovnávacie pásky sa odporúčajú najmä pre osoby so stómiou, ktoré majú parastomálnu herniu, stómiu s prolapsom alebo stómiu v neobvyklej polohe.



	Názov výrobku	Hrúbka (mm)	Priemer (mm)	Množstvo (ks)	Katalóg. číslo	ŠUKL kód
	Ally® Vyrovnávacie pásky			20	2022300	F5480A
F4.5 Ochranné rúško – Vyrovnávacie pásky – limit 120ks/rok (možno predpísať max 20 ks/mesiac)						

Ako používať



Zabezpečte, aby bola pokožka v okolí stómie čistá a suchá.



Odstráňte polovicu ochrannej fólie.



Priložte vyrovnávaciu pásku na pokožku tak, aby zároveň pokrývala okraj vrečka. Páska by mala pokrývať okraje vrečka najmenej pol centimetra.



Odstráňte zvyšnú časť ochrannej fólie a uhladte, aby ste dopomohli k maximálnemu príhnutiu.

Rovnakým spôsobom postupujte aj na druhej strane vrečka.

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie.


Ally® Stomická pasta

Ochranná bariérová pasta bez alkoholu

Ally® Stomická pasta je určená na vyplnenie záhybov a zvrásnení kože v okolí stómie, čím udržuje tesné priľnutie medzi stómiou a pomôckou. Pomáha znižovať riziko podtekania, chráni pokožku pred črevným obsahom a môže pomôcť predĺžiť dobu nosenia.

Ally® Stomická pasta sa odporúča najmä pre osoby s kožnými priehlbami alebo záhybmi v okolí stómie.



	Názov výrobku	Hrúbka (mm)	Priemer (mm)	Množstvo (ks)	Katalóg. číslo	ŠUKL kód
	Ally® Ochranná pasta bez alkoholu			1	2022200	F5481A
F4.1 Pasta, gél alebo zäsyp, limit: 360g/rok						

Ako používať



Zabezpečte, aby bola pokožka v okolí stómie čistá a suchá.



Pastu aplikujte na pokožku priamo z tuby. Môže sa tiež naniest aj priamo na podložku. Nenanášajte pastu na celú lepiacu plochu.



V prípade potreby uhladte pastu navlhčeným prstom alebo lekárskou lopatkou.



Po nalepení vrecka sa uistite, že podložka dobre prilnula okolo stómie. Jemne zatlačte vašimi prstami okolo celého okolia stómie. Prípadné zvyšky pasty pri uzávere vyčistite čistou vreckovkou a tubu zatvorte, aby ste zabránili vysychaniu pasty.



Aby bolo možné tubu ľahko vyprázdniť, odporúčame použiť svorku, ktorá je súčasťou balenia.

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie.


Ally® Stomický púder

Púder pre stomikov

Ally® Stomický púder je určený na absorpciu vlhkosti v okolí stómie, koža zostáva suchá. Pomáha chrániť pokožku, znižuje podráždenie a umožňuje lepšie prilnutie vrecka. Podporuje hojivé procesy podráždenej pokožky.

Ally® Stomický púder sa odporúča najmä pre osoby so stómiou, ktoré majú začervenanú, bolestivú alebo podráždenú pokožku.



	Názov výrobku	Hrúbka (mm)	Priemer (mm)	Množstvo (ks)	Katalóg. číslo	ŠUKL kód
	Ally® Stomický púder			1	2022100	F5482A
F4.1 Pasta, gél alebo zäsyp, limit: 360g/rok						

Ako používať



Zabezpečte, aby bola pokožka v okolí stómie čistá a suchá.



Odskrutkujte uzáver, nasmerujte fľašku priamo na pokožku, ktorú je potrebné ošetriť. Fľašku jemne potraсте a naneste primerané množstvo púdru na pokožku v okolí stómie.



Púder rovnomerne rozotrite. Môžete tiež použiť suchú vreckovku. Pred priložením lepiacej plochy podložky odstráňte prebytočný púder.

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte návod na použitie.

Už takmer 50 rokov sa aktívne zapájame do starostlivosti o stomikov a podporujeme ich ponukou bezpečných a ľahko použiteľných stomických vreciek a stomického príslušenstva.

Komplexné stomické portfólio pre každého stomického pacienta je súčasťou B. Braun komplexného holistického prístupu.



Ally® Stomické tesniace krúžky určené na vyplnenie dutín/záhybov v neporušenej pokožke okolo stómie, na použitie pri kolostómiiach, ileostómiiach, urostómiiach, pričom môžu pomôcť zabrániť úniku a chrániť pokožku. Zdravotnícka pomôcka. Výrobca je Zhende Medical Co., Ltd. Mesto Gaobu, 312035, Shaoxing, Zhejiang, ČÍNA.

Ally® Vyrovnávacie pásky sú navrhnuté tak, aby zabránili zdvíhaniu a oddeľovaniu okrajov podkladovej dosky a udržiavali podkladovú dosku bezpečne na svojom mieste počas dlhšej doby nosenia. Na použitie s kolostomickými, ileostomickými alebo urostomickými vreckami. Zdravotnícka pomôcka. Výrobcom je Zhende Medical Co., Ltd. Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, ČÍNA.

Ally® Stomická pasta je pohodlná a účinná kožná bariérová pasta určená na použitie pri kolostómii, ileostómii a urostómii a možno ju použiť na vyplnenie priestorov spôsobených kožnými záhybmi alebo inými kožnými nepravidlosťami, aby sa znížil únik a chránila sa pokožka. Zdravotnícka pomôcka. Výrobcom je Zhende Medical Co., Ltd. Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, ČÍNA.

Ally® Stomický prášok účinne absorbuje vlhkosť a udržiava pokožku suchú, pomáha ju chrániť, znižuje podráždenie a umožňuje lepšie prilnutie stomického vrecka. Na použitie pri kolostómiiach, ileostómiiach, urostómiiach. Zdravotnícka pomôcka. Výrobca je Zhende Medical Co., Ltd. Mesto Gaobu, 312035, Shaoxing, Zhejiang, ČÍNA.