

# Uro-Tainer®

## PREPLACHOVÝ SYSTÉM PRE MOČOVÉ KATÉTRE



### Suby G (Kyselina citrónová 3,23%)

Roztok Suby G sa odporúča u pacientov, u ktorých opakovane dochádza k nepriechodnosti permanentného močového katétra. Pravidelné preventívne preplachovanie umožňuje predísť tvorbe inkrustácií a zabrániť nepriechodnosti katétra. Pravidelné meranie pH a sledovanie časového intervalu, v ktorom dochádza k znepriechodneniu permanentného močového katétra, umožňujú ošetrojúcemu personálu zvoliť vhodnú frekvenciu použitia roztoku Suby G. Roztok možno použiť maximálne dvakrát denne. Ak dôjde k podráždeniu, treba liečbu prerušiť.

**Zloženie:** kyselina citrónová monohydrát 32,3 g/l; ľahký oxid horečnatý 3,8 g/l; hydrogénuhličitan sodný 7 g/l; edetan disodný dihydrát 0,1 g/l

### Chlorid sodný (NaCl 0,9%)

Fyziologický roztok chloridu sodného sa odporúča na vyplachovanie bunkového detritu a hlienu. Princíp jeho pôsobenia je čisto mechanický. Dávkovanie podľa potreby.

**Zloženie:** chlorid sodný 9 g/l

### Chlorid sodný M (NaCl 0,9%)

Uro-Tainer® M je vybavený portom pre aditíva a možno ho použiť na podávanie naordinovaných liečiv priamo do močového mechúra. Koncern B. Braun vyrába tiež širokú škálu doplnkov, ktoré umožňujú pridať, instilovať a aplikovať liečivé prípravky. Dávkovanie podľa predpisu. Roztok je sterilný a izotonický. Neobsahuje žiadne konzervačné látky.

**Zloženie:** chlorid sodný 9 g/l, s portom pre aditíva

Názov	Kusov v bal.	Katalóg. č.	ŠUKL kód
Suby G (Kyselina citrónová 3,23%)	10 x 100 ml vrecká	FB99839	B81392
Chlorid sodný (NaCl 0,9%)	10 x 100 ml vrecká	FB99833	B81387
Chlorid sodný M (NaCl 0,9%)	10 x 100 ml vrecká	FB99853	B81390